


ハイディーナ

++ hydina

series

かんたん操作ガイド


本製品は別冊子の取扱説明書をよくお読みの上、ご利用ください。
製品が届いたら必ず中身を確認してください。

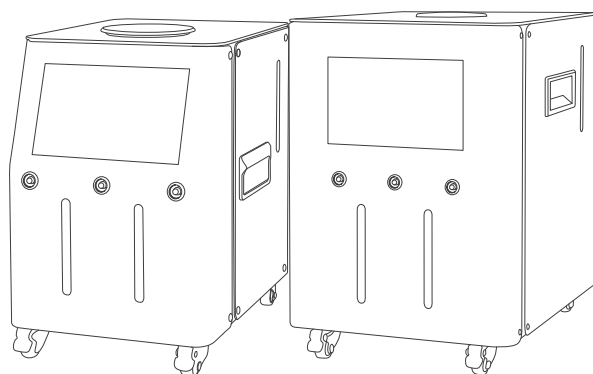


HYDINA (900)

HYDINA PRO (3000)

[付属品]

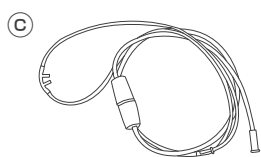

カニューレ
(900:2本/3000:4本)

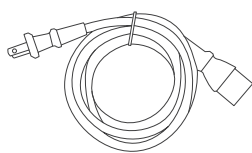


電源コード
(2m)



Yチューブ
(900:1本/3000:2本)



インテークチューブ
(900:1本/3000:2本)

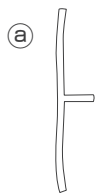

Tチューブ
(購入時、本体正面に装着)

輸送・運送時に
必要になる
チューブですので
保管してください。




給水用チューブ
(細・シリコンストッパー付)



予備用ヒューズ
(2本)



排水用チューブ
(細太接着)

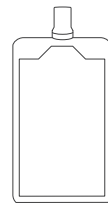

専用水パック
(900:4本/3000:6本)



注意

密閉室内での使用は不可

火気厳禁

喫煙不可

操作パネル

- | | |
|----------|---------------|
| ①温度表示 | ⑤時間設定キー |
| ②TDS表示 | ⑥スタート/一時停止キー |
| ③水素量設定表示 | ⑦正面ウィンドウライトキー |
| ④時間設定表示 | ⑧排水キー |

〈HYDINA(900)の場合〉




STEP.1

準備


① キャスターをロックする

前キャスターのストッパー2か所を必ずロックしてください。

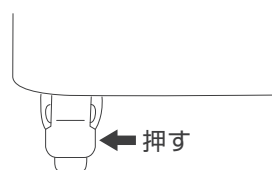

② 電源コードを接続する

- ① 電源コードのジャックを本体に
- ② 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

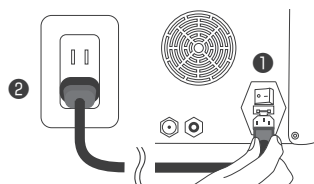


③ 給水する

天面のメインタンクキャップを外し
専用パックの水を入れてください。
必ずキャップはしっかりと締めてください。


※専用給水量 900:2本 / 3000:3本)

※給水用チューブを使った自動給水方法(取扱説明書P6参照)

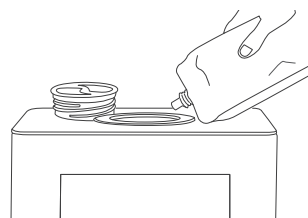


④ チューブを接続する

正面、吹出口のⒶTチューブを抜き、
付属品のⒶインテークチューブを
差ししてください。

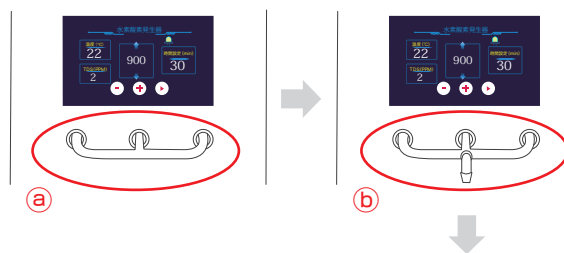


⑤ カニユレを連結する

インテークチューブの外向きの口に
Ⓒカニユレを連結してください。

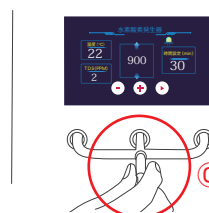

⑥ カニューレを装着する

鼻腔にカニューレを入れ
左右の耳にチューブを掛けてください。

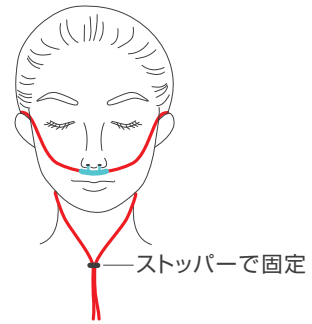


STEP.2

設定


① 本体の主電源をONにする

- ・赤ランプが点灯します
- ・始動音が鳴ります
- ・操作パネルが起動します

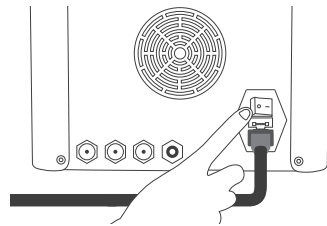

② パネルをタッチする

- ・お知らせ音が鳴ります
- ・操作面が表示されます

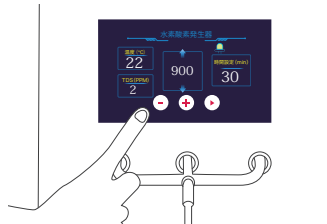

③ 時間設定をする



④ 水素量設定をする



STEP.3

稼働

■スタートキーをタッチする

- ・パネルの動画がスタートします
- ・残り時間が表示されます



残り時間

■一時停止をする場合

- スタートキーをタッチしてください。
- 再稼働する場合はもう一度タッチしてください。

■ウィンドウライトの消灯

- ライトマークをタッチしてください。
- 点灯させる場合はもう一度タッチしてください。



終了

■お知らせ音が鳴る

- パネルの時間が「0」になります。
- 終了後は節電のため主電源をOFFにしてください。



お手入れ

- ご使用のたびに本体に入れた専用水を捨てる必要はありません。
- 鼻孔や肌に触れる部分を洗浄し、カニューレの気液分離器の中の水を捨てるなど商品取扱説明書に従ってお手入れしてください。

【お問い合わせ先】

☎ 0120-746-810